

إختبار شخصي
للاستعمال الخارجي فقط
ليس للاستعمال الداخلي


محتويات العبوة:

- ❖ عبوة عبارة عن رقاقة معدنية (تحتوي جهاز إختبار و قطارة)
- ❖ أدوات مطلوبة ولكنها ليست شرطاً:
- ❖ عبوة لجمع عينة البول
- ❖ ساعة بمؤشر للتواني أو مؤقت.

يرجى قراءة التعليمات قبل إجراء الإختبار

قبل أن تبدأ في الإختبار :


لا تفتح الغلاف المعدني مالم تكن مستعداً لإجراء الإختبار.
يحفظ الإختبار في درجة حرارة الغرفة (15 درجات - 30 درجة سيليزية).
يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
لا تستخدم الإختبار بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.
إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص التعليمات أو النتائج الخاصة بك، من فضلك ارجع إلى المقطع الخاص بالأسئلة والإجابة في الجانب العكسي أو يمكنك الاتصال
بقسم الدعم الفني على الرقم 800-854-3002 (فقط في الولايات المتحدة الأمريكية).

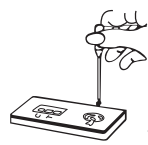

جهاز الإختبار



القطارة

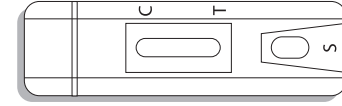

الشكل رقم 1

الغرض من الاستخدام :

لقد تم تصميم إختبار الحمل فورتل وذلك لاكتشاف كمية صغيرة جداً من هرمون الحمل hcg (هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشري) في البول . إن إختبار الحمل فورتل ذو حساسية عالية جداً، فقد أوضحت الدراسات أن هذا الإختبار باستطاعته أن يكتشف كمية قليلة جداً من hcg تصل الى 25 mul/ml بدقة تتجاوز 99%.

جمع عينة البول وتخزينها:




اجمعي عينة البول في وعاء نظيف، عادة تحوي أول عينة بول صباحية أعلى تركيز من هرمون الحمل وهي المفضلة لإختبار الحمل المبكر. إلا أنه يمكن استخدام أي عينة بول خلال النهار. يمكن الاحتفاظ بعينة البول في الثلاجة في درجة حرارة (من 2 - 8 درجة سيليزيه) لمدة تصل الى ثلاثة أيام. إذا كان استخدام العينة سيتم في نفس اليوم يمكن الاحتفاظ بها بدرجة حرارة الغرفة لمدة 8 ساعات.

ارشادات الاستخدام

- 1 - أزيلتي جهاز الإختبار من الغلاف الخاص به وضعيه على سطح نظيف.
 - 2 - ضعي عينة البول في درجة حرارة الغرفة.
 - 3 - املئي القطارة بعينة البول واحملوها بشكل مستقيم وافرغي عدة قطرات في المكان المخصص كما هو موضح في شكل 1. اضيفي 3 قطرات وتجنبي فقاعات الهواء.
 - 4 - ابدأ بالعد الزمني عند هذه النقطة. عندما يمتص البول لابد لك من رؤية لون وردي يتحرك عبر نافذة النتيجة.
 - 5 - عند 3 دقائق بالضبط، اقرأ النتيجة من نافذة النتيجة (يمكنك رؤية الأشكال 2,3,4) من الممكن أن تظهر النتيجة الإيجابية في أقل من 3 دقائق، ولكن لابد من انقضاء ثلاث دقائق كاملة للتأكد على أنها نتيجة سلبية . لا تقرأ النتيجة بعد مرور 3 دقائق.
- ملاحظة: بغض النظر إذا كنت حاملاً أم لا فإن خط التحكم لابد أن يظهر في نافذة النتيجة (يمكنك الاطلاع على الشكل 2). هذا يدل على أن الإختبار يعمل بصورة صحيحة. لو أن خط الإختبار ظهر أيضاً في نافذة النتيجة فهذا يعني أنك حامل (الشكل 3).

قراءة وتفسير نتائج الإختبار:

- 6 - في نافذة النتائج هناك منطقة التحكم بالعلامة « C » ومنطقة التحكم بالعلامة « T »

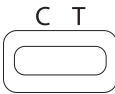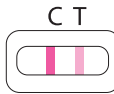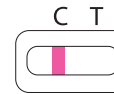لا يوجد خط التحكم أو خط إختبار فقط  إذا لم يظهر خط التحكم في نافذة النتيجة خلال 3 دقائق يعتبر الإختبار لاغياً أو باطلاً إذا ظهر خط الإختبار فقط في نافذة التحكم أيضاً يعتبر الإختبار لاغياً. في هذه الحالة يجب إعادة الإختبار باستخدام جهاز جديد. الشكل ٤	خط الإختبار وخط التحكم  عند ظهور خطين باللون الوردي - الأرجواني في نافذة التحكم (خط الإختبار وخط التحكم) حتى لو أن خط التحكم ذو لون باهت جداً خلال ال 3 دقائق فهذا يعني أن النتيجة إيجابية وأنت حامل. الشكل ٣	خط التحكم فقط بدون خط إختبار  عند ظهور خط التحكم فقط في نافذة التحكم فهذا دليل على أنه لا يوجد حمل. الشكل ٢
---	--	---

الإختبار باطل أو لاغٍ

يوجد حمل

لا يوجد حمل

فورتل®

إختبار الحمل كاسيت

الأسئلة الشائعة

كيف يعمل هذا الاختبار :

لقد تم تصميم اختبار الحمل فورتل® للكشف عن كمية صغيرة جدا من هرمون الحمل (هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية) في البول. حيث تتجاوز دقته 99٪ في الدراسات المخبرية، ويتم إنتاج هذا الهرمون بعد فترة وجيزة من الحمل، ويزيد تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

متى أستطيع أن أجري هذا الاختبار؟

يمكنك السماح بمرور 7 أيام من تاريخ الجماع قبل إجراء الاختبار. لا تحتاج إلى الانتظار حتى مرور موعد الدورة الشهرية لإكمال الاختبار، ولكن عند إجراء الاختبار قبل موعد دورتك الشهرية، فمن المستحسن استخدام أول كمية بول لك في الصباح. أن النتيجة الإيجابية في وقت مبكر يعني أنك حامل، ولكن إذا كانت النتيجة سلبية فإنه ينبغي أن يتم إعادة مباشرة بعد مرور موعد دورتك الشهرية. في حالة مرور موعد الدورة الشهرية فأنت لست بحاجة لاستخدام أول كمية بول صباحية.

هل من الممكن أن يؤثر الإرضاع من الثدي أو شرب الكحول على الاختبار؟ لا

ماذا أفعل إذا حصلت نتيجة اختبار إيجابية؟

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، يجب عليك استشارة الطبيب لمناقشة الحمل وما هي الخطوات والاحتياطات التي يجب اتخاذها تبعاً. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحتاجين لتأكيد الاختبار الخاص بك عن طريق إعادة الاختبار مع اختبار فورتل اخر بعد مرور ثلاثة أيام. نذكري أن العناية المبكرة بالحمل ضروري جداً لضمان صحة الأم و الطفل معا.

ماذا أفعل إذا حصلت على نتيجة سلبية؟

تكوني أخطأئي النتيجة سلبية تعني أنه لا يوجد هرمون الحمل ومن المحتمل أن تكوني لست حاملاً. إذا لم تبدأ فترة دورتك الشهرية في غضون أسبوع، فقد بتقدير اليوم الأول لبداية دورتك الشهرية، لذا أعيدي الاختبار باستخدام اختبار الحمل فورتل. لو ما زالت النتيجة سلبية ولم تحيض بعد، فإنه يجب عليك مراجعة الطبيب.

ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتيجة؟

لو أنك اتبعت التعليمات بعناية، فلن تحصلي على نتيجة خاطئة. ومع ذلك، هناك عقاقير معينة وفي بعض الحالات الطبية النادرة والتي قد تعطي نتيجة خاطئة. قد تسبب الأدوية التي تعطى عن طريق الحقن والتي تحتوي على هرمون الحمل hcg في حدوث نتيجة خاطئة. هذه تتضمن ولكنها ليست مقصورة على: A.P.L.®، بريجانيل®، فلوتين®، وبرفاسي®.

ماذا لو أنني لست متأكدة من حدة لون الخط في نتيجة الاختبار؟

إذا كان الاختبار إيجابياً، سوف يظهر في نافذة النتيجة شريطين باللونين الوردي - الأرجواني في خمس دقائق بعد تعرض الشريط الماص للبول. والنتيجة هي إيجابية بغض النظر عن كيفية ضعف أو قوة لون الخطين. ومع ذلك، إذا كنت غير متأكدة من النتيجة، يمكنك التأكد من النتيجة عن طريق تكرار اختبار فورتل بعد 3-4 أيام عند ارتفاع مستويات هرمون الحمل سوف ينتج عنه خط داكن وتأكيد للحمل. إذا فشل تكرار الاختبار لإنتاج خط داكن، من فضلك اتصل بخط المساعدة الخاص بنا لمزيد من تفسير النتيجة.

ما هي الفاعلية السريرية للاختبار؟

قد أجريت دراسات سريرية للاختبار باستخدام 100 عينة مؤكدة. أظهر اختبار دقة أكبر من 99٪، والنوعية أكبر من 99٪، وحساسية الاختبار أكبر من 99٪.

هل يمكن أن تتغير النتيجة بعد مرور مدة معينة من الزمن؟

النتيجة الإيجابية (الحمل) لن تتغير بمرور عدة أيام بعد الانتهاء من الاختبار. ومع ذلك، قد يلاحظ ظهور بعض الخلفيات المحمرة بعد عدة ساعات من إجراء الاختبار. لا ينبغي قراءة النتيجة السلبية (غير حامل) في إطار النتيجة بعد مرور الخمس دقائق المنتظرة للاختبار. بعد 30 دقيقة قد تظهر بعض النتائج السلبية على أنها نتائج إيجابية على نحو ضعيف، يحدث هذا لأن المواد الكيميائية بالاختبار يستمر بالتفاعل حتى بعد الخمس دقائق المنتظرة للاختبار.

بمن أستطيع أن أتصل لو أن عندي أي استفسارات أخرى؟

لو أن عندك أي استفسارات أخرى عن اختبار فورتل أو عن النتائج الخاصة بك، اتصل مجاناً ٨٠٠-٨٥٤-٣٠٢ طوال أيام الأسبوع من ٨ صباحاً - ٥ مساءً (USA pst) (S) سوف يشعر فريقنا المختص والمدرّب بالمساعدة للإجابة على أي استفسارات لديك بخصوص الاختبار

تحاولي أن يصبح لديك طفلاً؟

اختبار فورتل للتبويض يتنبأ باليوم الأمثل لكي تصبحي حاملاً، قومي بشراء واحدًا لليوم.

رسالة هامة من بيو ميريك

لزيادة الفرص لكي يصبح حملك صحيحاً من أجلك ومن أجل طفلك، لابد أن تأخذي بعين الاعتبار:

- الحفاظ على نظام غذائي جيد ومتوازن
- التوقف عن التدخين وتعاطي الكحوليات

لا بد من إدراك أن الثلاثة أشهر الأولى من الحمل هي الفترة الأكثر حرجاً لنمو الطفل.


لا بد من رؤية الطبيب في الحال لتقديم الرعاية المناسبة والإرشادات الغذائية.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D30175- Hannover
Germany



BIOMERICA, INC., 17571 Von Karman Avenue, Irvine, CA 92614 USA

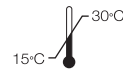

IVD



REF 1048

CE 0459

Fortel is a trademark of Biomerica, Inc.

61048-01_AR Oct 2013